

## Topi-CLICK® MICRO™

### Instrucciones de Uso




Aplicación de Micro-dosis Tópica

- ✓ Dosis tópicas medidas automáticamente, proveen dosis correctas y consistentes cada vez
- ✓ Los CLICKs son audibles, táctiles y visibles e indican la medida de la dosis (no es necesario marcar la dosis manualmente)
- ✓ La innovadora forma de tríada permite el manejo preciso
- ✓ Insignia de "REFILL" incorporada ayuda al paciente a reordenar el medicamento a tiempo



**PASO 1:**  
Destape el Topi-CLICK® Micro™ y ponga la tapa al lado para más tarde.

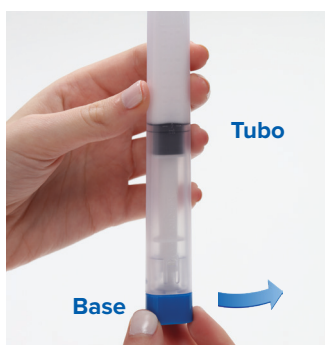

**PASO 2:**  
Sostenga el Micro™ en posición vertical y gire/CLICK la Base el número de CLICKs o ml's especificados en la etiqueta de la receta. Use las marcas Audibles, Táctiles y Visibles de CLICK en la Base en forma de tríada como indicadores de dosis. Asegúrese de alinear la Base con el Tubo Tríada para estar seguro que la dosis sea dispensada completamente



**PASO 3:**  
Aplique el medicamento tópico con el aplicador incorporado, según las instrucciones del doctor o farmacéutico. **Continúe frotando hasta que el medicamento sea completamente absorbido por la piel.** IMPORTANTE: El aplicador incorporado disminuye el riesgo de transferencia a áreas no deseadas. No es necesario usar los dedos para aplicar el medicamento.



**PASO 4:**  
Coloque la tapa después de cada dosis, para evitar la evaporación. Asegúrese que la tapa esté completamente cerrada.

**Cada giro/Click de la base dispensa exactamente 0.05 ml de medicamento.**

Innovadora Forma de TRÍADA Permite la Aplicación Con Control Preciso

#### Insignia "REFILL"



Línea de relleno

Émbolo

#### El sistema recordatorio con la Insignia "Refill" (Refill Badge™) le permite al paciente reordenar de una manera oportuna.

Cuando la línea negra de ARRIBA en el Émbolo llega a la línea en relieve debajo de la palabra "REFILL," quedan aproximadamente 32 CLICKs. A la línea sobre la palabra "REFILL," quedan aproximadamente 12 CLICKs.

*Nota: Las marcas graduadas son solamente para el uso de relleno en la farmacia. Siga las instrucciones en la etiqueta antes del uso. Topi-CLICK® Micro™ no es rellenable.*

Hecho con materiales de grado FDA | Libre de Ftalato | Bloquea Rayos UV y es Reciclable ♻️